

Beispielhafte Patientenbilder mediven® Flachstrick (untere Extremität)

medi

Aufgrund der Materialstärke, der Passform und der Produkt-Eigenschaften empfehlen wir flachgestrickte medizinische Kompressionsstrümpfe von mediven für Patienten mit folgenden Charakteristika.*

Leichte Materialstärke

Für
Flachstrick-
Einsteiger

mediven mondi®

Lipödem, Stadium 1, 2

Lipödem, Stadium 1, 2

- Neigung zu orthostatischen Ödemen
- Gleichmäßig verdickte, homogen imponierende Subkutis
- Knotenartige Struktur im verdickten Subkutanbereich
- Neigung zu Hämatomen
- Negatives Stemmer'sches Zeichen

Patientenindividuelle Kriterien

- Keine Hautfalten / Kalibersprünge
- Kein(e) begleitende(s) Übergewicht / Adipositas
- Geringer bis moderater Berührungsschmerz



Mittlere Materialstärke

Für
erleichtertes
Anziehen

mediven® cosy

Lipödem, Stadium 2, 3

Lipödem, Stadium 2, 3

- Neigung zu orthostatischen Ödemen
- Knotenartige Struktur im verdickten Subkutanbereich
- Ausgeprägte Umfangsvermehrung mit beginnenden Gewebeüberhängen
- Neigung zu Hämatomen
- Negatives Stemmer'sches Zeichen

Patientenindividuelle Kriterien

- Moderate bis starke Kalibersprünge**
- Begleitende(s) Übergewicht / Adipositas
- Geringer bis moderater Berührungsschmerz
- Nach Liposuktion***



Starke Materialstärke

Für sehr
hohe Wand-
stabilität

mediven® 550 Bein

Lipödem, Stadium 2, 3

Lipödem, Stadium 2, 3; Lipo-Lymphödem

- Neigung zu ausgeprägten orthostatischen Ödemen
- Knotenartige Struktur im verdickten Subkutanbereich
- Ausgeprägte Umfangsvermehrung mit beginnenden Gewebeüberhängen
- Neigung zu Hämatomen
- Positives Stemmer'sches Zeichen bei sekundärem Lymphödem

Patientenindividuelle Kriterien

- Tiefe Hautfalten / starke Kalibersprünge
- Begleitende Adipositas / morbide Adipositas
- Starker Berührungsschmerz



Schwere chronisch venöse Insuffizienz

Schwere chronisch venöse Insuffizienz

z. B. Rezidivprophylaxe des Ulcus cruris venosum (C5)

Patientenindividuelle Kriterien

- Keine Hautfalten / Kalibersprünge
- u.U. begleitende(s) Übergewicht / Adipositas
- Geringe Erfahrung mit Flachstrick (Übergang Rundstrick zu Flachstrick)



Lymphödem, Stadium 1, 2

Lymphödem, Stadium 1, 2 (stabil)

- Spontan reversibles Lymphödem oder nicht spontan reversibles Lymphödem (stabil)
- Sekundäre Gewebeeränderungen
- Ödem mit weicher Konsistenz

Patientenindividuelle Kriterien

- Leicht / moderat vertiefte natürliche Hautfalten
- Hoher Aktivitätsgrad möglich (aufgrund flexiblen Gestricks)



Lymphödem, Stadium 2, 3

Lymphödem, Stadium 2, 3

- Nicht spontan reversibles Ödem
- Sekundäre Gewebeeränderungen
- I. d. R. positives Stemmer'sches Zeichen
- Deformierende harte Schwellung mit Überlappung
- Lymphödemytische Hautveränderungen

Patientenindividuelle Kriterien

- Vertiefte natürliche Hautfalten
- Begleitende Adipositas / morbide Adipositas



Positives Stemmer'sches Zeichen

Ein positives Stemmer'sches Zeichen liegt vor, wenn die Haut am Grundgelenk der Zehen nicht abhebbar ist. Dies ist ein Hinweis auf ein vorliegendes Lymphödem (links im Bild; rechts normal).

* Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlung weder die Diagnose des Arztes noch die Beratung durch den medizinischen Fachhandel ersetzt. Die Wahl des optimalen medizinischen Kompressionsstrümpfes ist abhängig von der Indikation und den individuellen Bedürfnissen der Patienten.
Entscheidend für die Material-Auswahl ist jeweils das Kriterium (Indikation, Schweregrad, Begleiterkrankungen, etc.) mit der schwersten Ausprägung.

** medi Tipp: Die hohe Längsverdehnung des Gestricks beim mediven cosy kann das Anziehen beispielsweise bei Kalibersprüngen erleichtern.

*** medi Empfehlung: bei weiter anhaltender Symptomatik des Lipödems, zum Beispiel Ödem oder Druckschmerz.

medi. ich fühl mich besser.

Beispielhafte Patientenbilder mediven® Flachstrick (untere Extremität)



Aufgrund der Materialstärke, der Passform und der Produkt-Eigenschaften empfehlen wir flachgestrickte medizinische Kompressionsstrümpfe von mediven für Patienten mit folgenden Charakteristika.*

Leichte Materialstärke

Für
Flachstrick-
Einsteiger

mediven® mondi®

Produkt-Eigenschaften

- Leichte Wandstabilität
- Hohe Querverdehnung
- Weiches, feines Gestrick

Vorteile für Ihre Patienten

- Ideal für drucksensible Patienten
- Ideal für Patienten bei Wechsel von Rundstrick zu Flachstrick
- Einarbeitung von Silber-Segmenten möglich (für eine antibakterielle Wirkung)

Mittlere Materialstärke

Für
erleichtertes
Anziehen

mediven® cosy

Produkt-Eigenschaften

- Mittlere Wandstabilität
- Hohe Längsverdehnung
- Flexibles, weiches Gestrick

Vorteile für Ihre Patienten

- Hohe Bewegungsfreiheit
- Ideal für Sport / Reisen
- Ideal vor und nach Liposuktion**

Starke Materialstärke

Für sehr
hohe Wand-
stabilität

mediven® 550 Bein

Produkt-Eigenschaften

- Sehr hohe Wandstabilität, hoher Arbeitsdruck
- Geringe Quer- und Längsverdehnung
- Festes, starkes Gestrick

Vorteile für Ihre Patienten

- Sehr hohe Wandstabilität für optimale Ödem-Reduktion
- Unter Umständen subjektiv wahrgenommene Schmerzlinderung (z. B. bei Lipödem)

Rezeptbeispiel

Kundenkarte bzw. Kundenrührer

Name, Vorname des Versicherten

Kassen-Nr. Versicherten-Nr. Status

Vertraggeber-Nr. VK gültig bis Datum

Rp. (Bitte Leertäume durchschreiben)

2 Diagnose: Rezidivprophylaxe des Ulcus cruris venosus (CS)

3 1 Stück

4 Leichtes Material, mediven mondi,

5 CCL 2, Oberschenkelstrumpf (AG),

6 Geschlossene Fußspitze

7 Maßanfertigung flachgestrickt

8 17.06.16.1009

Rezeptbeispiel

Kundenkarte bzw. Kundenrührer

Name, Vorname des Versicherten

Kassen-Nr. Versicherten-Nr. Status

Vertraggeber-Nr. VK gültig bis Datum

Rp. (Bitte Leertäume durchschreiben)

2 Diagnose: Lipödem Stadium 2 Untere Extremitäten

3 1 Stück

4 Mittleres Material, mediven cosy,

5 CCL 2, Strumpfhose (AT),

6 Geschlossene Fußspitze

7 Maßanfertigung flachgestrickt

8 17.06.17.1030

Rezeptbeispiel

Kundenkarte bzw. Kundenrührer

Name, Vorname des Versicherten

Kassen-Nr. Versicherten-Nr. Status

Vertraggeber-Nr. VK gültig bis Datum

Rp. (Bitte Leertäume durchschreiben)

2 Diagnose: Beidseitiges Beinlymphödem Stadium 3

3 1 Stück

4 Starkes Material, mediven 550 Bein,

5 CCL 3, Strumpfhose (AT),

6 Geschlossene Fußspitze

7 Maßanfertigung flachgestrickt

8 17.06.17.2008

* Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlung weder die Diagnose des Arztes noch die Beratung durch den medizinischen Fachhandel ersetzt. Die Wahl des optimalen medizinischen Kompressionsstrumpfes ist abhängig von der Indikation und den individuellen Bedürfnissen der Patienten. **Entscheidend für die Material-Auswahl ist jeweils das Kriterium (Indikation, Schweregrad, Begleiterkrankungen, etc.) mit der schwersten Ausprägung.**

** medi Empfehlung: nach Liposuktion bei weiter anhaltender Symptomatik des Lipödems, zum Beispiel Ödem oder Druckschmerz.

Zweckbestimmung: Flachgestrickter medizinischer Kompressionsstrumpf zur Kompression der unteren Extremitäten, hauptsächlich bei der Behandlung von Erkrankungen des Lymphgefäßsystems.

