

medi SAS[®] light

Anziehanleitung für Patienten
Fitting instructions for patients

Zweckbestimmung: medi SAS light ist eine Schultergelenkorthese zur Immobilisierung und Entlastung

Intended purpose: medi SAS light is a shoulder joint support for immobilisation and stress relief



Hinweise: Achten Sie darauf den verletzten Arm nur vorsichtig zu bewegen. Legen Sie zur Vorbereitung die Unterarmauflage auf einen erhöhten Tisch. Das hilft Ihnen, die Orthese leichter anzulegen. Die Anleitung können Sie für den linken oder rechten Arm nutzen.

Comments: Make sure that the injured arm will only be moved very carefully. Place the orthosis on a raised table. This simplifies the dressing process. The instructions can be used for the left and the right arm.




Führen Sie den Bauchgurt knapp unterhalb der Brust um den Oberkörper (Bild 1).
Wrap the abdominal belt slightly below your chest around the upper body (picture 1).



Kletten Sie den Bauchgurt unter leichtem Zug auf der Vorderseite fest (Bild 2).
Fasten the velcro strap with slight tension on the front side (picture 2).



Legen Sie den verletzten Arm vorsichtig in die Unterarmablage. Ziehen Sie mithilfe des gesunden Armes das Kissen an den Bauchgurt und kletten Sie es seitlich fest (Bild 3).
Place your injured arm carefully in the armrest. Pull it with your healthy arm to the abdominal belt and fix it (picture 3).

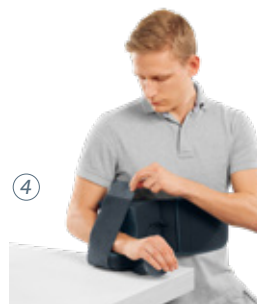

Schließen Sie den Unterarmgurt, indem Sie diesen auf der Oberseite der Unterarmablage mit dem Klettverschluss befestigen (Bild 4).
Fasten the forearm strap by fixing it on the upper side of the armrest (picture 4).



Führen Sie den bereits eingestellten Schultergurt über die gesunde Schulter und schließen Sie den Verschluss (Bild 5).
Pass the already adjusted shoulder strap over the healthy shoulder to the front side and close the closure (picture 5).

medi Tipp: Kontrollieren Sie den richtigen Sitz der gesamten Schulterorthese vor dem Spiegel.
medi tip: *Check the correct fit of the entire shoulder orthosis in front of the mirror.*

