

Die richtige Pflege für Ihre Kompressionsstrümpfe

Mit guter Pflege bleiben Ihre Kompressionsstrümpfe lange funktionsfähig.
Hier ein paar Tipps zur täglichen Pflege:



Nach jedem Tragen waschen




Waschanleitung beachten



Strümpfe von Hand oder
im Schonwaschgang waschen




Keine Weichspüler und
optischen Aufheller verwenden

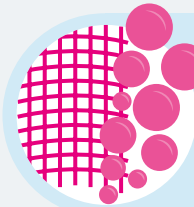

Spezielle Pflegeprodukte wie
medi clean schonen das Gestrick



An der Luft oder im Wäschetrockner
(Schongang) trocknen

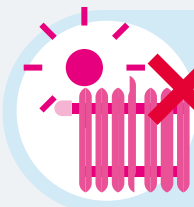

Nicht in der Sonne oder auf
Heizkörpern trocknen lassen

Für die optimale Therapie-Unterstützung:
Strumpf täglich tragen und nach spätestens sechs Monaten erneuern.