



Stap 1
Trek de zwarte onderkous aan. Zorg ervoor dat er geen plooiën in zitten.



Stap 2
Plaats de juxtalite net boven de enkel en onder de knie met de zwarte kant van het materiaal naar de zwarte onderkous toe.



Stap 3
Zet de bovenste 2 banden (band 3 en 4) losjes op het systeem vast.

Dit houdt het geheel op zijn plaats en maakt het gemakkelijker het systeem te verplaatsen naar de juiste positie op het been.



Stap 4
Maak de 2 onderste banden los. Trek daarvan band 2 schuin omhoog en zet band 1 vast op het systeem.



Stap 5
Voordat band 2 wordt geïnstalleerd maakt u band 3 los. Nu trekt u band 3 schuin omhoog en zet u band 2 vast.



Stap 6
Voordat band 3 wordt geïnstalleerd maakt u band 4 los. Nu trekt u band 4 schuin omhoog en zet u band 3 vast. Vervolgens zet u band 4 ook vast op het systeem.

Inspecteer het systeem op openingen of vouwen. Herpositioneer de banden indien nodig.


Instellen van de juiste compressie

Stap 7


- Kies de juiste kant van de kaart en de juiste drukschaal.
- Begin met de onderste band. Houd de punt van het zwarte driehoekje op de BPS-kaart bij een van de BPS-strepen op de onderste band.
- Kijk op welke drukwaarde (mmHg) het tweede streepje uitkomt op de BPS-kaart.
- Als het BPS-streepje op het verband of voorbij de juiste drukwaarde ligt, de band zodanig aanpassen aan dat het tweede BPS-streepje het verband aansluit op de voorgeschreven drukwaarde.
- Als de band te veel druk geeft, de band eerst weer helemaal losstrekken en vervolgens weer vastzetten.
- Herhaal stappen 3 tot en met 6 bij elke band naar boven. Zorg ervoor dat alle banden op dezelfde druk zijn ingesteld. Het kan nodig zijn om de banden in de loop van de dag aan te passen om de voorgeschreven druk te handhaven.




Stap 8
Zodra het compressiesysteem zit trek dan indien nodig het voetstuk aan.

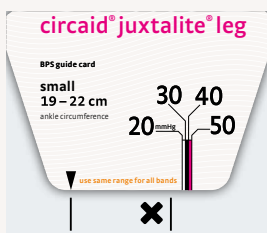


Te weinig compressie

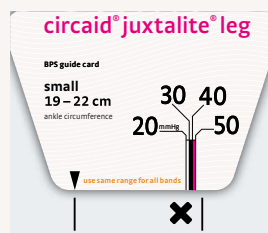

Te veel compressie

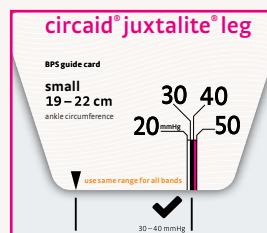

Correct voorgeschreven compressie

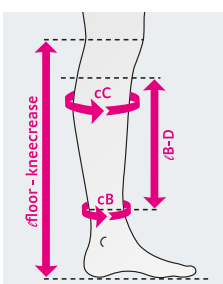


Omvang in cm	
	S M M-X L L-X XL XL-X XXL
c C	26-36 33-44 44-54 41-51 51-61 37-48 48-61 53-64
c B	19-22 22-27 22-27 25-32 25-32 30-37 30-37 35-42
Actuele lengte van het systeem in cm	
	Kort Lang
ℓ B-D	28 33
Maatmeting in cm	
ℓ ondergrond - knieplooi	< 44 > 44

Beoogd doel juxtalite

Het compressiesysteem is ontworpen om compressie te geven aan het been voor patiënten met veneuze en lymfatische aandoeningen.


Aantrek-instructies zwarte compressie onderkous

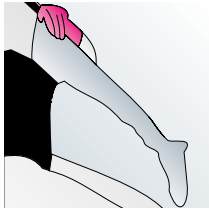

Stap 1

Zorg allereerst voor een goed droog been. Een kous aantrekken na het douchen is over het algemeen lastiger vanwege de vochtige huid.

Plaats uw hand in de kous helemaal tot aan het voetstuk.

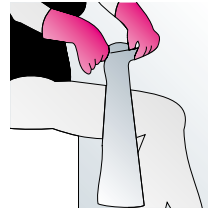

Stap 2


Neem de hak tussen uw duim en wijsvinger. Keer de kous tot aan de voet binnenste buiten. De schacht is nu omgekeerd en het voetgedeelte blijft binnen in de kous.



Stap 3

Trek de opening met beide handen uit elkaar en trek het voetgedeelte over uw voet, tot aan de wreef.

Let op: Plaats uw hiel op de juiste plek in de steunkousen. De hiel is duidelijk zichtbaar in de kous.

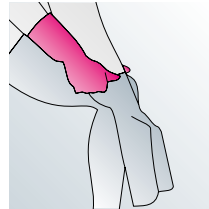

Stap 4

Schuif het beengedeelte gelijkmatig omhoog. Let erop dat u de kous niet draait, aan de randen trekt of teveel in lengte uitrekt. De makkelijkste manier om de kous naar boven te trekken is om het boord om te vouwen en stukje voor stukje aan het dubbelgevouwen boord te trekken.

Hulpmiddelen

Het aan- en uittrekken van kousen wordt soms als lastig ervaren. Gelukkig zijn er praktische hulpmiddelen voor het aan- en uittrekken van compressiekousen. De medi Butler collectie biedt u een ruime keuze.



medi textielhandschoenen

De textielhandschoenen maken het gemakkelijker om de kous beter op de been of arm te verdelen en correct te plaatsen. Meer grip door de goede pasvorm en het reliëf op de handpalm. Vervaardigd met latex (polyester en latex).



medi 2 in 1

Eén hulpmiddel geschikt voor zowel het aan- als uittrekken van kousen. Eenvoudig in gebruik. Geschikt voor kousen met zowel open als gesloten teenstuk. Weinig kracht nodig bij het aan- en uittrekken. Gemakkelijk mee te nemen.



medi Butler Off

de medi Butler Off maakt het gemakkelijker om alle soorten kousen en sokken uit te doen. De handige dagelijkse hulp is uiterst comfortabel en gemakkelijk te gebruiken. De aluminium stang verlengt de arm en maakt het mogelijk om de kousen of sokken uit te trekken zonder te bukken.



medi Butler met lange handvatten

Voor eenieder die de compressiekousen gemakkelijk, en zonder hulp, aan kan trekken, is dit het ideale aantrekhulpmiddel. Het lange handvat zorgt voor maximale stabiliteit bij het aantrekken van elastische kousen en panty's.



medi panty Butler

Een passend hulpmiddel voor compressie-panties: de medi panty butler heeft twee praktische instapbeugels waarover een been van de panty wordt getrokken en dus voorgespannen. De beugels zijn geschikt voor alle kouslengtes en uitvoeringen.



medi Butler met verstelbare handvatten

Dit aantrekhulpmiddel voor kousendragers is vooral bedoeld voor gebruikers die beperkt zijn in hun bewegingen. Het handvat kan ingesteld worden tussen de 27 en 59 cm.



medi Big (XXL) Butler

De beugel van de Big Butler heeft een grotere diameter. Dit biedt ruimte voor grotere omtrekken die vaak gepaard gaan met een bewegingsbeperking.



medi Arm Butler / medi Arm-Big Butler

De medi Arm Butler is voor het aantrekken van armkousen. U kunt kiezen uit twee uitvoeringen, afhankelijk van de armomvang.



medi Hospital Butler

Het aantrekhulpmiddel voor een verzorgende die u helpt bij het aantrekken van de kousen. Tevens te gebruiken in de kliniek.