

Hurtigguide for tilpasning av: Lympha Press® armmansjett, Comfy arm og Jakkemansjett



Lympha Press Arm- og jakkemansjetter kan brukes til alle Lympha Press pulsatorer, nye og gamle. Det anbefales å bruke et tynt bomullsplagg under mansjetten.

Armmansjett

Armmansjettene skal dekke hele hånden, fra fingertupene og oppover, til og med skulderen. Slangesettet er integrert i mansjetten og kommer ut ved fingrene.

Tilpass armens omkrets ved hjelp av de langsgående glidelåsene.

For at mansjetten skal sitte godt under behandlingen festes den medfølgende stroppen på skrå rundt overkroppen.



Jakkemansjett

Jakkemansjetten behandler hele overkroppen og vil påvirke din mulighet til å bevege deg under behandlingen.

1. Åpne glidelåsen på en arm til over håndleddet slik at du kan betjene pulsatoren.
2. Åpne glidelåsen foran og ta på jakken.
3. Lukk jakken og juster stroppene foran slik at jakken sitter inntil huden over bryst og mage.
4. Det er ikke anbefalt å bruke høyere trykk enn 40mmHg over magen.
5. Koble slangesettene til pulsatoren.



Comfy arm/halv jakke

Comfy arm behandler en arm og halve torso. Mansjetten har et eget luftkammer i axillen.

1. Åpne glidelåsen foran i jakken og nederst på armen.
2. Ta jakken på og sjekk at axillekammeret vender inn i armen.
3. Dra det polstrede sidestykke rundt kroppen og fest først borrelåsene, så lukkes glidelåsen.
4. Stram stroppene til plagget sitter behagelig.
5. Det er ikke anbefalt å bruke høyere trykk enn 40mmHg over magen.
6. Koble slangesettet til pulsatoren.
7. Lukk glidelåsen nederst på armen.

