

Hurtigguide: Lympha Press® Mini Press



Enkel veiledning for montering og oppstart.
For ytterligere informasjon, se Bruksanvisning som følger apparatet.

OBS!

I tilfeller der pasienten tidligere har brukt Lympha press Mini (grønn) anbefales det å starte med et lavere trykk på Mini Press.




1. Plasser Mini Press på et hardt og jevnt underlag og slik at bruker når frem til frontpanelet under behandlingen for eventuelt å justere trykk, tid eller skru av apparatet.

2. Koble strømledning til apparatet (venstre side ved hovedbryter) og sett stikkontakten i et vegguttak.

3. Koble kompresjonsplaggets luftslanger til apparatet. Endestykkene på slangesettene festes til luftuttakene foran på apparatet. Pilene på endestykket skal peke opp. Hold godt i endestykket og skyv det inn i luftuttaket. Det høres et klikk når endestykket sitter på plass. Brukes kun en mansjett, plugges det andre luftuttaket med en sperreplugg.



Sperreplugg

4. Skru på hovedbryter 

5. Still inn trykket med bryteren til venstre på frontpanelet. Trykk inn og vri bryteren til ønsket behandlingstrykk.



6. Velg behandlingstid ved å trykke på knappen "Time Minutes".



Trykk til det lyser på ønsket behandlingstid.



7. Ta på kompresjonsplagget og finn en god stilling.

8. Trykk på start/stopp-knappen  og behandlingen starter.

9. Behandlingen stopper automatisk når innstilt tid er oppnådd. Mansjetten tømmes for luft.