


Hurtigguide: Lympha Press® Mini V2



Enkel veiledning for montering og oppstart.
For ytterligere informasjon, se Bruksanvisning
som følger apparatet.



1. Plasser Mini V2 på et hardt og jevnt underlag og slik at bruker når frem til frontpanelet under behandlingen for eventuelt å justere trykk, tid eller skru av apparatet.
2. Koble strømledning til apparatet (til venstre på baksiden) og sett stikkontakten i et vegguttak.
3. Koble kompresjonsplaggets luftslanger til apparatet. Endestykkene på slangesettene festes til luftuttakene foran på apparatet. Pilene på endestykket skal peke opp. Hold godt i endestykket og skyv det inn i luftuttaket. Det høres et klikk når endestykket sitter på plass. Brukes kun en mansjett, plugges det andre luftuttaket med en sperreplugg.
4. Velg behandlingstrykk ved å vri høyre bryter til ønsket behandlingstrykk. Trykket kan justeres opp eller ned mens behandlingen pågår.
5. Ta på kompresjonsplagget og finn en god stilling.
6. Behandlingen starter når du vrir venstre bryter til ønsket behandlingstid. Dersom du vrir bryteren til "Hold"-posisjon vil apparatet fortsette å gå til du vrir tilbake til "Off".
7. Behandlingen stopper automatisk når innstilt tid er oppnådd (30-120 minutter). Mansjetten tømmes passivt for luft.

