

Hurtigguide: Lympha Press® Optimal V2




Enkel veiledning for montering og oppstart.
For ytterligere informasjon, se Bruksanvisning
som følger apparatet.




1. Plasser Optimal V2 på et hardt og jevnt underlag og slik at bruker når frem til frontpanelet under behandlingen for eventuelt å justere trykk, tid eller skru av apparatet.
2. Koble strømledning til apparatet (på baksiden) og sett stikkontakten i et vegguttak.
3. Koble kompresjonsplaggets luftslanger til apparatet. Endestykkene på slangesettene festes til luftuttakene foran på apparatet. Pilene på endestykket skal peke opp. Hold godt i endestykket og skyv det inn i luftuttaket. Det høres et klikk når endestykket sitter på plass. Brukes kun en mansjett, plugges det andre luftuttaket med en sperreplugg.



Sperreplugg

4. Skru på hovedbryter  (til venstre på baksiden).
5. Velg et av 4 behandlingsprogram ved å trykke på opp/ned-piltastene.

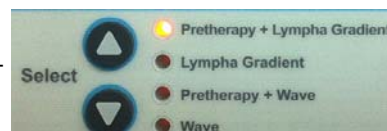

6. Velg behandlingstid ved å trykke på pluss eller minusknappene til ønsket behandlingstid vises i displayet.
7. Velg behandlingstrykk ved å trykke på pluss eller minusknappene til ønsket behandlingstrykk vises i displayet. Trykket kan justeres mens behandlingen pågår.



7. Ta på kompresjonsplagget og finn en god stilling.
8. Trykk på startknappen og behandlingen starter. 
9. Behandlingen stopper automatisk når innstilt tid er oppnådd. Mansjetten tømmes for luft.
10. Behandlingen kan når som helst stoppes ved å trykke på pauseknappen. Se komplett bruksanvisning for mer informasjon om pauseknappen. 