

## Hurtigguide for tilpasning av: Lympha Press® benmansjett og buksemansjett



Lympha Press ben- og buksemansjetter kan brukes til alle Lympha Press pulsatorer, nye og gamle. Det anbefales å bruke en tynn tights eller liknende under mansjetten.

### FL Benmansjetter

I benmansjettene er luftslangene integrert i mansjetten. Slangesettet kommer ut ved ankelknoken og slutter i endestykket som skal kobles til pulsatoren.

1. Sett benet inn i mansjetten og dra den opp slik at den strekkes i full lengde.
2. Lukk deretter borrelåsene omkring benet, fra foten og oppover.
3. Tilpasningen skal gjøres inntil huden, men ikke stramt.



### Bukse-mansjetter

Bukse-mansjettene brukes mens pasienten ligger på ryggen. Slangesettene kommer ut ved hoftene og kobles til pulsatoren. Finn en god stilling før behandlingen starter.

1. Tilpass buksens omkrets ved hjelp av de 3 langsgående glidelåsene i hver side. Buksen skal ikke sitte for stramt da det skal være plass til at luftcellene kan fylles med luft.
2. Åpne glidelåsene halvveis ned.
3. Skli inn og ned i buksen og trekk glidelåsene helt opp.
4. For å tilpasse riktig lengdestørrelse benyttes glidelåsene på tvers, nederst på benas bakside. Den glidelåsen som befinner seg nærmest hælen, åpnes og foret dras litt ut av åpningen. Nederste del av benet kan da bøyes og får form som en fot.
5. 3 klaffer med borrelås nede ved ankelen festes til hverandre og justeres slik at vinkelen i ankelen blir behagelig.

