

Måttabell för rundstickade benstrumpor med extra vid vad



Denna måttabell gäller för **mediven plus** och **mediven forte**

Att tänka på innan mättagning:

- Mättagning för ske stående men kan även utföras sittande eller liggande om patienten av hälsoskäl inte kan stå upp.
- Vid mättagning av omgång ska måttbandet sträckas men inte skära in eller dras åt.
- Längdmåttet avläses med fördel på en måttbräda.
- I annat fall bör mätpunkterna märkas med penna så att längd- och omfångsmått avläses från exakt samma punkt.
- Samtliga längdmått utgår från golvet.

Standardstorlekar		I	II	III	IV	V	VI	VII	
	eD	cD	27-33	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48	40-50
	eC	cC	34-38	37-41	40-44	42-46	44-48	46-50	48-52
	eB ₁	cB ₁	23-27	24-29	26-32	29-35	31-37	33-39	35-41
	eB	cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32
	eY	cY	26-31	28-33	29-35	31-37	32-38	33-40	34-42
	eA	cA	17-22	19-24	21-26	23-29	25-32	27-34	28-35

Viktig information

Tabellen till vänster gäller endast mediven plus

Standardstorlekar		I	II	III	IV	V	VI	VII	
	eD	cD	28-33	30-35	32-37	34-39	36-41	38-43	40-45
	eC	cC	33-38	35-40	37-42	39-44	41-46	43-48	45-50
	eB ₁	cB ₁	26-28	28-31	30-33	32-35	34-37	36-39	38-41
	eB	cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32
	eY	cY	28-30	29-32	31-34	33-36	34-38	36-40	37-41
	eA	cA	18-21	20-23	22-25	24-27	26-29	28-31	30-33

Viktig information

Tabellen till vänster gäller endast mediven forte

Rekommenderade längdmått för standardstrumpor (cm)				
eD	mediven plus	Normal	39-44	Kort 34-38
eD	mediven forte	Normal	38-43	Kort 33-37

Viktig information

Om brukaren ej passar in på någon standardstorlek rekommenderar vi att kompressionsstrumporna måttillverkas.

Vid slutan fotlängd rekommenderas max motsvarande kostorlek	
mediven plus	35-43
mediven forte	Liten slutan tå: 36-38, stor slutan tå 39-43

Tillgängliga standard- och trendfärger

Vi erbjuder även ett brett utbud av både standard- och trendfärger. Dessa uppdateras varje säsong för att följa modets trender. Se aktuell färgöversikt på vår hemsida för mer information.

Obs! Mindre avvikelser både nedåt och uppåt kan förekomma beroende på varje enskild patients individuella förutsättningar.