

# Måttabell för rundstickade benstrumpor Standardstorlek



Denna måttabell gäller för mediven forte

## Att tänka på innan mättagning:

- Mättagning för ske stående men kan även utföras sittande eller liggande om patienten av hälsoskäl inte kan stå upp.
- Vid mättagning av omgång ska måttbandet sträckas men inte skära in eller dras åt.
- Längdmåttet avläses med fördel på en måttbräda.
- I annat fall bör mätpunkterna märkas med penna så att längd- och omfångsmått avläses från exakt samma punkt.
- Samtliga längdmått utgår från golvet.

| mediven forte             |             | I               | II           | III          | IV           | V            | VI           | VII          |              |
|---------------------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Lårstrumpa häftband x-vid | cG          | 48-53           | 51-57        | 55-61        | 59-65        | 62-70        | 66-74        | 71-80        |              |
| Lårstrumpa med häftband   | cG          | 44-47           | 46-50        | 50-64        | 53-58        | 56-61        | 60-65        | 64-70        |              |
| Strumpbyxa                | cG          | 44-53           | 46-57        | 50-61        | 53-65        | 56-70        | 60-74        | 64-80        |              |
|                           | Omfångsmått | cG              | 44-53        | 46-57        | 50-61        | 53-65        | 56-70        | 60-74        |              |
|                           | Längdmått   | cG              | 44-53        | 46-57        | 50-61        | 53-65        | 56-70        | 60-74        | 64-80        |
|                           |             | cF              | 40-47        | 42-51        | 45-55        | 48-58        | 51-62        | 54-67        | 58-72        |
|                           |             | cE              | 30-37        | 33-40        | 36-42        | 38-44        | 40-46        | 42-48        | 44-50        |
|                           |             | cD              | 28-33        | 30-35        | 32-37        | 34-39        | 36-41        | 38-43        | 40-45        |
|                           |             | cC              | 29-34        | 31-36        | 33-38        | 35-40        | 37-42        | 39-44        | 41-46        |
|                           |             | cB <sub>1</sub> | 24-26        | 26-28        | 28-31        | 30-33        | 32-35        | 34-37        | 36-39        |
|                           |             | cB              | <b>18-20</b> | <b>20-22</b> | <b>22-24</b> | <b>24-26</b> | <b>26-28</b> | <b>28-30</b> | <b>30-32</b> |
|                           |             | cY              | 28-30        | 29-32        | 31-34        | 33-36        | 34-38        | 36-40        | 37-41        |
|                           |             | cA              | 18-21        | 20-23        | 22-25        | 24-27        | 26-29        | 28-31        | 30-33        |

### Viktig information

Tabellen till vänster gäller endast mediven forte.

| Rekommenderade längdmått för standardstrumpor (cm) |                       |        |       |            |
|--|-----------------------|--------|-------|------------|
| cD   | Knästrumpa            | Normal | 39-44 | Kort 34-38 |
| cD   | mediven forte         | Normal | 38-43 | Kort 33-37 |
| cG   | Lårstrumpa/Strumpbyxa | Normal | 72-83 | Kort 62-71 |

| Tillgängliga standard- och trendfärger  |
|---|
| Vi erbjuder även ett brett utbud av både standard- och trendfärger. Dessa uppdateras varje säsong för att följa modets trender. Se aktuell färgöversikt på vår hemsida för mer information. |

| Rekommendera fotlängd max motsvarande skostorlek |  |
|--|--|
| mediven forte                                    | Liten sluten tå: 36-38, stor sluten tå 39-43 |

### Viktig information

Om brukaren ej passar in på någon standardstorlek rekommenderar vi att kompressionsstrumporna måttillverkas.

Obs! Mindre avvikelser både nedåt och uppåt kan förekomma beroende på varje enskild patients individuella förutsättningar.