

mediklin		Arbeitsanweisung	Seite	1 von 3
ID-Nr.	AA 002/01	Qualitätsprüfung Strümpfe	Datum	17.01.13

ZIEL UND ZWECK2

ANWENDUNGSBEREICH2

BEGRIFFSDEFINITIONEN2

VERANTWORTLICHKEITEN.....2

BESONDERE SICHERHEITSHINWEISE2

BESCHREIBUNG.....2

MITGELTENDE DOKUMENTE3

Erstellt	Geprüft	Freigegeben
Ersteller	QM-Beauftragter	Unternehmensleitung
Datum	Datum	Datum

mediklin		Arbeitsanweisung	Seite	2 von 3
ID-Nr.	AA 002/01	Qualitätsprüfung Strümpfe	Datum	17.01.13

Ziel und Zweck

Die funktionelle Qualitätsprüfung nach der Aufbereitung stellt sicher, dass nur Strümpfe zur erneuten Anwendung beim Kunden kommen, welche die geforderte medizinische Wirksamkeit der Strümpfe erbringen. Die optische Qualitätsprüfung gewährleistet die einwandfreie optische Präsentation der Produkte.

Anwendungsbereich

Nach der Aufbereitung werden alle Strümpfe mittels Sichtkontrolle auf Verschmutzungen und mechanische Beschädigungen geprüft. Nach Stichprobenplan werden Stichproben gezogen, die an den Hersteller der Strümpfe versandt und dort einer Funktionsprüfung unterzogen werden.

Begriffsdefinitionen

Optische Qualitätsprüfung

Zur optischen Prüfung wird der Strumpf über einem Kontrollbrett gedehnt und auf Verschmutzungen und Beschädigungen des Gestrickes geprüft.

Funktionelle Qualitätsprüfung

Die Funktion der Strümpfe wird mittels HATRA Kompressionsmessung geprüft.

Verantwortlichkeiten

Qualitätsbeauftragter

Der Qualitätsbeauftragte ist verantwortlich für die Schulung und Einweisung der Mitarbeiter, welche die Qualitätsprüfungen durchführen. Darüber hinaus trägt er dafür Sorge, dass sich die Prüfmittel in einsatzbereitem Zustand befinden und die Stichproben gemäß Stichprobenplan gezogen werden und an den Hersteller der Strümpfe zur Druckprüfung versandt werden.

Besondere Sicherheitshinweise


- Prüfungen dürfen nur von entsprechend qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- Es dürfen nur kalibrierte Prüfmittel zur Druckmessung verwendet werden.

Beschreibung

Optische Qualitätsprüfung

Um die optische Prüfung vorzunehmen, wird der Strumpf über das mediklin® Kontrollbrett gezogen und von allen Seiten auf Beschädigungen des Gestrickes und auf Verschmutzungen hin überprüft.

Defekte und/oder verschmutzte Strümpfe werden in die jeweils dafür vorgesehenen Behälter abgeworfen.

		Arbeitsanweisung		Seite	3 von 3
ID-Nr.	AA 002/01	Qualitätsprüfung Strümpfe		Datum	17.01.13

Funktionelle Qualitätsprüfung

Die funktionelle Prüfung findet grundsätzlich nach der optischen Qualitätsprüfung statt und wird mittels HATRA Kompressionsmessung an jeweils zufällig entnommenen Stichproben durchgeführt. Der Hersteller der Strümpfe führt diese Messung durch und dokumentiert die Ergebnisse.

Ist eine Stichprobe fehlerhaft informiert der Hersteller der Strümpfe umgehend. Aufgrund der Prüfergebnisse werden ggfs. gemeinsam mit dem Hersteller Maßnahmen festgelegt und durchgeführt, die zur Behebung des Problems geeignet sind. Eine abschließende Beurteilung stellt den nachhaltigen Erfolg der durchgeführten Maßnahmen fest.

Mitgeltende Dokumente

QR 008 Prüfprotokoll HATRA