

<b>mediklin</b>		Arbeitsanweisung	<b>Seite</b>	1 von 2
<b>ID-Nr.</b>	AA 004/01	<b>Wasch- und Trockenverfahren</b>	<b>Datum</b>	28.01.13

**ZIEL UND ZWECK**.....2

**ANWENDUNGSBEREICH** .....2

**BEGRIFFSDEFINITIONEN** .....2

**VERANTWORTLICHKEITEN**.....2

**BESONDERE SICHERHEITSHINWEISE** .....2

**BESCHREIBUNG**.....2

**MITGELTENDE DOKUMENTE** .....2

Erstellt	Geprüft	Freigegeben
Ersteller	QM-Beauftragter	Unternehmensleitung
Datum	Datum	Datum

<b>mediklin</b>		Arbeitsanweisung	<b>Seite</b>	2 von 2
<b>ID-Nr.</b>	AA 004/01	<b>Wasch- und Trockenverfahren</b>	<b>Datum</b>	28.01.13

## Ziel und Zweck

Das festgelegte Wasch- und Trockenverfahren stellt sicher, dass bei der Aufbereitung von Thromboseprophylaxestrümpfen und Strumpfverbänden stets die bei der Validierung festgelegten Parameter eingehalten werden.

## Anwendungsbereich

Die Wasch- und Trockenverfahren sind bei allen Aufbereitungen von medizinischen Thromboseprophylaxestrümpfen und Strumpfverbänden anzuwenden.

## Begriffsdefinitionen

## Verantwortlichkeiten

### Qualitätsbeauftragter

Der Qualitätsbeauftragte ist verantwortlich für die Schulung und Einweisung der mit der Tätigkeit beauftragten Mitarbeiter. Er gibt Wasch- und Trockenparameter frei und achtet auf die Einhaltung der hygienischen Richtlinien.

## Besondere Sicherheitshinweise

- Es dürfen ausschließlich die freigegebenen Waschhilfsmittel und Maschinenparameter verwendet werden.

## Beschreibung

### Wäsche von Strümpfen

Programm 7 Thromboseprophylaxestrümpfe

### Trocknung von Strümpfen

Programm 12 Thromboseprophylaxestrümpfe. **Temperatureinstellung 70°C beachten!**

## Mitgeltende Dokumente

- VA 004      Aufbereitung von medizinischen Thromboseprophylaxestrümpfen und Strumpfverbänden
- VA 009      Validierung, Re-Validierung und Kontrolle des Aufbereitungsprozesses