

mediklin		Verfahrensanweisung	Seite	1 von 4
ID-Nr.	VA 004/01	Aufbereitung von medizinischen Thromboseprophylaxestrümpfen und Strumpfverbänden	Datum	28.01.13

ZIEL UND ZWECK.....2

ANWENDUNGSBEREICH2

BEGRIFFSDEFINITIONEN2


VERANTWORTLICHKEITEN.....2

BESONDERE SICHERHEITSHINWEISE2

BESCHREIBUNG.....3

MITGELTENDE DOKUMENTE3

Erstellt	Geprüft	Freigegeben
Ersteller	QM-Beauftragter	Unternehmensleitung
Datum	Datum	Datum

		Verfahrensanweisung		Seite	2 von 4
ID-Nr.	VA 004/01	Aufbereitung von medizinischen Thromboseprophylaxestrümpfen und Strumpfverbänden		Datum	28.01.13

Ziel und Zweck

Die vorliegende Verfahrensanweisung beschreibt den Ablauf der Aufbereitung von medizinischen Thromboseprophylaxestrümpfen und Strumpfverbänden. Durch das festgelegte Verfahren werden der wirtschaftliche Einsatz der Produkte, die Einhaltung von Hygienevorschriften (z. B. RKI-Richtlinie), die Erhaltung der medizinischen Wirksamkeit und die Konformität mit gesetzlichen und behördlichen Forderungen (insbesondere MPG und MPBetreibV) sichergestellt.

Anwendungsbereich

Diese Verfahrensanweisung ist anzuwenden für die Aufbereitung aller medizinischen Thromboseprophylaxestrümpfe und Strumpfverbände. Sie beschreibt die gesamten Arbeitsabläufe von der Abholung unreiner Strümpfe beim Kunden bis zur Auslieferung der aufbereiteten Strümpfe. Im einzelnen werden folgende Arbeitsschritte beschrieben:

- Abholung gebrauchter Strümpfe
- Transport zum mediklin® Servicecenter
- Lagerung im unreinen Bereich
- Wäsche
- Trocknung
- Lagerung im reinen Bereich
- Qualitätskontrolle
- Erfassung
- Verpackung
- Lagerung

Begriffsdefinitionen

Strümpfe bezeichnen in dieser Verfahrensanweisung alle medizinischen Thromboseprophylaxestrümpfe und Strumpfverbände


Verantwortlichkeiten

Wäschereileiter

Der Wäschereileiter ist für die Durchführung der Aufbereitung nach den vorgegebenen Verfahren verantwortlich.

Besondere Sicherheitshinweise

- Hygiene- und Schutzmaßnahmen sind zu beachten
- Gebrauchsanweisungen für Maschinen sind zu beachten
- Beim direkten oder indirekten Kontakt mit unreinen Strümpfen ist immer volle Schutzkleidung zu tragen

		Verfahrensanweisung		Seite	3 von 4
ID-Nr.	VA 004/01	Aufbereitung von medizinischen Thromboseprophylaxestrümpfen und Strumpfverbänden		Datum	28.01.13

Beschreibung

Abholung unreiner Strümpfe

Unreine Strümpfe werden je nach Vertragsvereinbarung an zentraler Stelle im Krankenhaus oder auf den jeweiligen Pflegestationen abgeholt. Die unreinen Strümpfe werden vom Pflegepersonal in den mediklin® Wäschesack abgeworfen. Bei der Abholung wird das innere Wäschenetz und der Umsack verschlossen. Das Gewicht des gefüllten Wäschenetzes inkl. Umsack wird erfasst und auf dem Abholschein dokumentiert. Ggfs. wird der Umsack in einen mediklin® Transportbehälter verpackt. Der Transportbehälter wird als „UNREIN“ gekennzeichnet.

Transport zum mediklin® Servicecenter

Der Transport unreiner Strümpfe erfolgt in verschlossenen mediklin® Transportbehältern. Die Trennung von unreinen und reinen Strümpfen im Lieferfahrzeug wird durch die verschlossenen und gesicherten Transportbehälter Gewähr leistet. Nach dem Beladen des Fahrzeuges führt der Mitarbeiter eine Händedesinfektion durch.

Lagerung im unreinen Bereich

Die unreinen Strümpfe werden über den „unreinen Eingang“ in den unreinen Bereich verbracht. Dort werden sie in den Transportkisten bis zur Wäsche gelagert.

Wäsche

Vor der Wäsche wird das innere Wäschenetz mit den unreinen Strümpfen aus dem Transportbehälter bzw. dem Umsack entnommen und in die Waschmaschine gegeben. Der Umsack wird in den verschließbaren Sammelbehälter für unreine Umsäcke abgeworfen. Der Transportbehälter wird gereinigt, desinfiziert und durch die Schleuse in den reinen Bereich gebracht.

Die Wäsche der Strümpfe erfolgt nach dem in der Arbeitsanweisung „Wäsche von Strümpfen“ festgelegten Verfahren.

Unreine Wäschesäcke werden einem Desinfektionswaschverfahren gemäß Arbeitsanweisung „Wäsche von Wäschesäcken und Schutzkitteln“ unterzogen.

Trocknung


Unmittelbar nach der Wäsche werden die Strümpfe im Maschinentrockner (Tumbler) getrocknet. Eine Lagerung nasser bzw. feuchter Strümpfe ist für maximal zwei Stunden möglich.

Lagerung im reinen Bereich

Im reinen Bereich werden die Strümpfe zwischen den verschiedenen Arbeitsschritten immer in reinen verschlossenen Transportkisten gelagert und transportiert, um Verschmutzungen zu vermeiden.

Qualitätskontrolle

Die Strümpfe werden nach Wäsche und Trocknung einer Qualitätsprüfung gemäß der Arbeitsanweisung „Qualitätsprüfung Strümpfe“ unterzogen. Dazu werden die Strümpfe auf Verschmutzungen und Beschädigungen hin überprüft.

		Verfahrensanweisung	Seite	4 von 4
ID-Nr.	VA 004/01	Aufbereitung von medizinischen Thromboseprophylaxestrümpfen und Strumpfverbänden	Datum	28.01.13

Stichprobe

Entsprechend dem Stichprobenplan werden den als „in Ordnung“ befundenen Strümpfen eine Stichprobe entnommen, um diese auf Kompression zu prüfen. Die Prüfung wird vom Hersteller der Strümpfe medi Bayreuth durchgeführt. Dort werden die Ergebnisse der Kompressionsprüfung auch dokumentiert.

Erfassung

Jeder Strumpf wird mittels Scanner erfasst. Das MTS Softwareprogramm prüft die durchlaufenen Waschzyklen und registriert den vorangegangenen Waschzyklus.

Strümpfe, die bereits die vorgegebenen Waschzyklen durchlaufen haben, werden durch das System angezeigt und müssen aussortiert werden. Das Programm schreibt die Daten ausgemusterter Strümpfe zur späteren Analyse in eine Datenbank.

Strümpfe, die wegen Verschmutzung oder Beschädigung aussortiert wurden, werden ebenfalls erfasst. Die Seriennummer des Strumpfes wird mit dem Grund für die Aussortierung zur späteren Analyse in einer Datenbank abgelegt.

Verpackung

Je nach Vertragsvereinbarung werden die Strümpfe nach Größen sortiert und paarweise oder zu fünf Paaren in luftdurchlässigen Polybeutel verpackt. Der Polybeutel wird mit einem Aufkleber versehen, der alle relevanten Daten enthält.

Lagerung

Bis zur Auslieferung werden die Strümpfe im reinen Lager in verschlossenen Transportkisten, die als „REIN“ gekennzeichnet sind, gelagert.

Mitgeltende Dokumente

UVV Wäscherei

Hygienerichtlinien des Robert-Koch-Institutes, Berlin

Anwendungsvorschriften für die verwendeten Desinfektionsmittel

Reinigungs- und Desinfektionsplan Betriebsräume

Reinigungs- und Desinfektionsplan Lieferfahrzeug

Arbeitsanweisung „Wäsche von Strümpfen“

Arbeitsanweisung „Wäsche von Wäschesäcken und Schutzkitteln“

Arbeitsanweisung „Qualitätsprüfung Strümpfe“

Softwareprogramm MTS - mediklin[®] tracking system

Produktspezifikation luftdurchlässige Polybeutel